

「ヒヤッ」とした経験ありませんか？




スコープ先端保護チューブで
デリケートな先端部分を守りましょう

スコープ先端保護チューブの効果はどれくらい？

使用場面も聞いてみたよ

◎ 導入後1年間の先端系修理金額グラフと使用場面の一例

高 ← 修理抑制効果 → 低

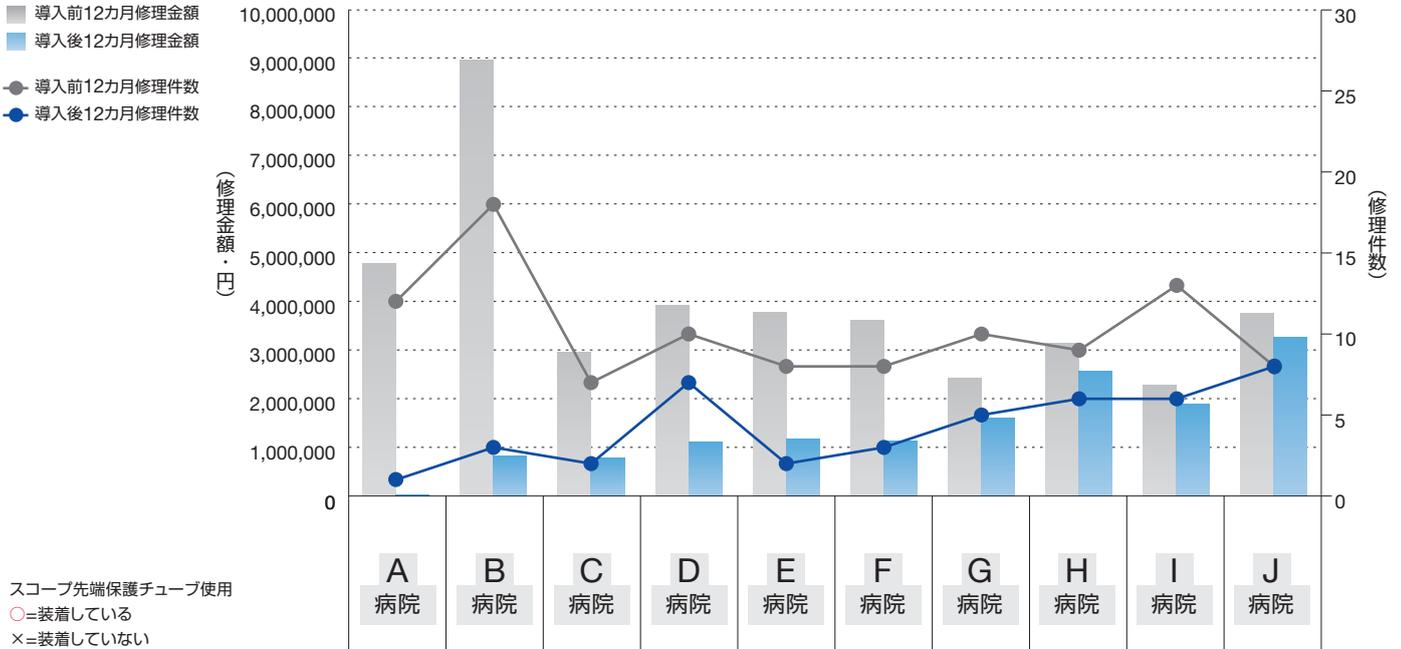

スコープ先端保護チューブ使用
○=装着している
×=装着していない

先端系修理費減少率*	99.5%	90.8%	73.7%	71.8%	68.7%	68.7%	34.2%	17.8%	16.7%	13.1%
使用場面回数	12	9	5	5	10	9	8	6	6	4
シチュエーション										
保管庫→ベッドサイド 移動時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
内視鏡セット時	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
内視鏡セット後～検査直前まで	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×
検査中	-									
検査終了～トrolley(ortレー等)に掛けるまで	○	○	×	×	○	×	×	×	○	×
予備洗浄中(吸水等)	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○
検査室→洗浄室 移動時	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
シンク内手洗い中	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○
シンク内→洗浄機 移動時	○	×	×	×	○	○	○	×	×	○
洗浄機終了→乾拭き台等 移動時	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×
内視鏡全体乾拭き中	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×
全体乾拭き後→保管庫 移動時	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×
全体乾拭き後→検査室 移動時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×

※先端系修理費減少率 ティーメディクス調べ
※ご施設様の結果です。修理抑制効果は使用状況により異なります。

スコープ先端保護チューブが特に有効と感じる場面はどこ？ お客様に聞きました。



運搬時全般

内視鏡の取扱いに不慣れな人でも、**先端だけは守られているので安心**

運搬用ケースに入れて運ぶので、**保護チューブがあると安心**

格段に修理が減ったので、**保護チューブがあつて助かっている**

故障予防の意識付けに役立っている


持ち運ぶときにぶつけて驚くことが無くなった

保管庫に入れるとき操作部に気を取られて先端をぶつけるので、**保護チューブがあると安心**

運搬時に先端をぶつけて驚いて慌てることがあった。今は**保護チューブがあつて助かっている**

ハンガーに掛けたり外したりするとき、運搬時に人とすれ違うとき、**保護チューブが付いていると安心**

運搬時や保管庫の**出し入れの時に安心**。保護チューブに慣れた今では無いと不安

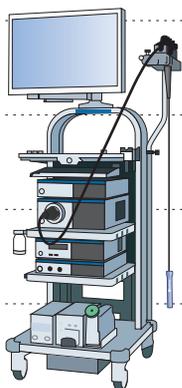

内視鏡セット後～検査直前まで

待機状態で吊るしているときなど**安心感がある**

トロリーに掛けてぶらぶらしているときに**保護チューブが付いていると良かったと思う**

壁掛けやトロリーハンガーに掛けて手を離すときにぶつけやすいので、**保護チューブを装着している良かったと思う**

シンク内手洗い中

タライの中で内視鏡を洗うときに先端をぶつけるので、**保護チューブで保護している**

カゴの中に内視鏡を重ねてしまうことがあるので、**先端が保護されていると安心**



効果的な運用方法のご紹介

この運用方法はティームデックスが推奨する運用方法です。ご施設の状況に合わせて、最適な運用方法をご検討ください。



(朝)保管庫内で、当日使用の内視鏡すべてに、予めスコープ先端保護チューブを装着する。



検査スケジュールにあわせて、スコープ先端保護チューブが装着された内視鏡を保管庫から検査室(トロリー/ベッドサイド)まで運ぶ。


検査前

保管庫～検査室
／
検査前



スコープ先端保護チューブを装着したまま、使用前点検を実施する。

- そのまま送気・送水・吸引が可能です。
- ホワイトバランスをとるとき等スコープ先端保護チューブが邪魔になるときは、少し操作部方向へスコープ先端保護チューブを移動して、内視鏡先端部を必要分だけ露出すると作業が容易です。

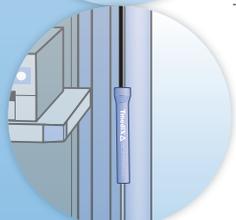


点検完了後検査開始まで、内視鏡にはスコープ先端保護チューブを装着したまま待機させる。



検査直前に、スコープ先端保護チューブを取り外す。

- Dr.に外してもらうと、よりスムーズです。

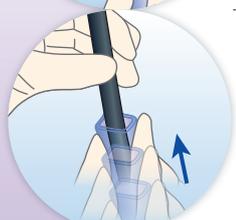

検査終了後、内視鏡先端部を乾拭きし、すぐにスコープ先端保護チューブを装着する。

- 内視鏡が濡れていると抜け落ちやすくなります。内視鏡の先端部を拭いてから、装着してください。


検査後

検査室～洗浄室



スコープ先端保護チューブを装着したまま、ベッドサイド洗浄(洗浄吸引)をする。

- 使用前点検と同じです。

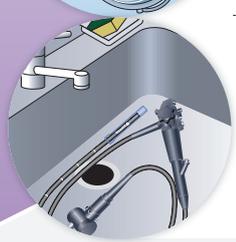

スコープ先端保護チューブを装着したまま、洗浄室(シンク)へ運ぶ。

習慣化することが
大切なんだね



一次洗浄時、スコープ先端保護チューブを外し、内視鏡先端部とスコープ先端保護チューブを洗浄する。内視鏡先端部洗浄後は再びスコープ先端保護チューブを装着。その他の内視鏡部位をブラッシング・洗浄する。

- スコープ先端保護チューブの洗浄は、内視鏡洗浄用洗剤を用い、試験管ブラシのようなものでブラッシングしてください。(特にホルド部に汚れが溜まりやすいので、よくブラッシングしてください。)

洗浄後、スコープ先端保護チューブを装着したまま内視鏡を洗浄機まで運び、内視鏡先端部を洗浄機に収納した後に、スコープ先端保護チューブを取り外す。

取り外した(使用済み)スコープ先端保護チューブは、使用済みスコープ先端保護チューブを置く所定の場所に一時保管する。

使用済みのスコープ先端保護チューブは半日分または1日分を溜め、午前検査後または1日検査後に、まとめて洗浄と消毒/滅菌をする。

- 消毒の場合は、高水準消毒液に浸漬します。
- 滅菌の場合は、オートクレーブ可能です。

内視鏡先端部を乾拭きしてから消毒または滅菌された清潔なスコープ先端保護チューブを装着して、洗浄機から取り出す。

- 洗浄機のそばに、消毒または滅菌済みの清潔なスコープ先端保護チューブを置いておくと便利です。

スコープ先端保護チューブを装着したまま、内視鏡全体を乾拭きする。


次の検査室または保管庫へ運ぶ。

スコープ先端保護チューブが装着された内視鏡を保管庫へ収納。1日の検査終了後にまとめて取り外す。

- 取り外し忘れのないようにご注意ください。


検査後

検査室～洗浄室

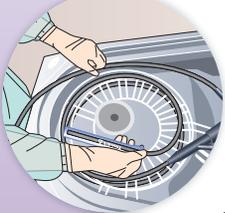

内視鏡 消毒後

検査終了

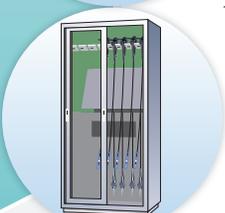

デリケートな内視鏡先端部を、優しく守る新しい習慣に。

内視鏡保管庫から検査室、検査室から洗浄室への内視鏡運搬時に、
気をつけていても内視鏡先端部をぶつけてしまい、
高額修理となってしまうことは少なくありません。
スコープ先端保護チューブはそんな運搬時の不意の衝撃から
デリケートな内視鏡先端部を保護します。



アクアブルー

■ 製品仕様 (素材: シリコーン)

製品名・サイズ

スコープ先端保護チューブ(S)
長さ:150mm/外径:16mm/内径:12mm

スコープ先端保護チューブ(M)
長さ:180mm/外径:24mm/内径:19mm

スコープ先端保護チューブ(L)
長さ:240mm/外径:26mm/内径:21mm

ベビーピンク

■ 製品仕様 (素材: シリコーン)

製品名・サイズ

スコープ先端保護チューブ(S)
長さ:150mm/外径:16mm/内径:12mm

スコープ先端保護チューブ(M)
長さ:180mm/外径:24mm/内径:19mm

スコープ先端保護チューブ(L)
長さ:240mm/外径:26mm/内径:21mm

マスカットグリーン

■ 製品仕様 (素材: シリコーン)

製品名・サイズ

スコープ先端保護チューブ(S)
長さ:150mm/外径:16mm/内径:12mm

スコープ先端保護チューブ(M)
長さ:180mm/外径:24mm/内径:19mm

スコープ先端保護チューブ(L)
長さ:240mm/外径:26mm/内径:21mm

製品の詳細は、お問い合わせいただくか、最新の価格表をご確認ください。

サイズの選び方(内視鏡との組み合わせ推奨)

(S) … 先端部外径が3mm以上 6mm未満の内視鏡

(M) … 先端部外径が6mm以上 15mm未満の内視鏡

(L) … (M)ではカバーできない先端湾曲部ゴムが長いタイプの内視鏡、または(M)ではきつく感じられるための内視鏡。

ご注意

- 本製品は内視鏡を持ち運ぶ際に内視鏡の先端部を保護するためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
- 内視鏡を洗浄、消毒又は保管する際は、必ず本製品を取り外してください。上記が遵守されない場合、細菌が繁殖し、人の生命・身体に重大な影響を及ぼす危険性があります。
- 消毒後の内視鏡には洗浄及び、消毒又は滅菌処理を行った本製品を使用してください。
- 本製品の透明度が落ちたり、装着力が弱くなったら使用しないでください。
- 本製品をご使用の際は、事前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 内視鏡の先端湾曲部ゴムを、ゆとりをもってカバーできるサイズをお選びください。

● 仕様・外観および契約条件等については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティームデクス株式会社
Tmedix

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス
TEL : 03-3349-8590 FAX : 03-3349-8771
<http://www.tmedix.com/>

取扱販売店名

■ スコープ先端保護チューブ ラインアップ

2020年2月1日現在

サイズ	色	入数	商品コード	JANコード
S	アクアブルー	1	S021209-009	4580330830097
		5	S021901-066	4580330830592
		10	S021901-072	4580330830653
		30	S021501-040	4580330830363
	ベビーピンク	1	S021501-032	4580330830295
		5	S021901-067	4580330830608
		10	S021901-073	4580330830660
		30	S021501-043	4580330830394
	マスカットグリーン	1	S021501-037	4580330830349
		5	S021901-068	4580330830615
		10	S021901-074	4580330830677
		30	S021501-046	4580330830424
M	アクアブルー	1	S021209-010	4580330830103
		5	S021107-004	4580330830042
		10	S021901-075	4580330830684
		30	S021501-041	4580330830370
	ベビーピンク	1	S021501-033	4580330830301
		5	S021501-030	4580330830271
		10	S021901-076	4580330830691
		30	S021501-044	4580330830400
	マスカットグリーン	1	S021501-038	4580330830356
		5	S021501-035	4580330830325
		10	S021901-077	4580330830707
		30	S021501-047	4580330830431
L	アクアブルー	1	S021303-014	4580330830141
		5	S021901-069	4580330830622
		10	S021901-078	4580330830714
		30	S021501-042	4580330830387
	ベビーピンク	1	S021501-031	4580330830288
		5	S021901-070	4580330830639
		10	S021901-079	4580330830721
		30	S021501-045	4580330830417
	マスカットグリーン	1	S021501-036	4580330830332
		5	S021901-071	4580330830646
		10	S021901-080	4580330830738
		30	S021501-048	4580330830448

※「スコープ先端保護チューブ (S) 3本入」は、2020年1月末日で販売終了しました。

スコープ先端保護チューブの使い方ビデオをWEBで公開中です。ぜひご覧ください。

URL <http://www.tmedix.com/service/lineup/tube.html>



■ お問合せ先

ティーメディクス株式会社

〒163-0914

東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス

TEL 03-3349-8590 FAX 03-3349-8871