

内視鏡保管時の注意


- 内視鏡を保管庫へしまうときは必ず本製品を取り外してください。

スコープ先端保護チューブ保管時の注意

- 内視鏡保管庫に運搬する際に装着した本製品は洗浄を行ってください。洗浄後、高水準消毒または滅菌を行ってください。
- 本製品が高水準消毒または滅菌のレベルが保たれるように保管してください。

保管

- 1** 洗浄および高水準消毒
または滅菌済みの
本製品を装着し、運搬します。
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

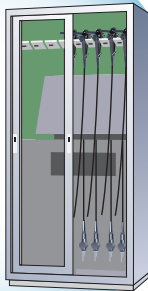

内視鏡保管庫

4-a 保管庫へ

- 洗浄および高水準消毒
または滅菌済みの
本製品を装着し、運搬します。
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

4-b 検査室へ

- 洗浄および高水準消毒
または滅菌済みの
本製品を装着し、運搬します。
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

検査

- 2** ● 検査前
本製品が取り外されている事を確認します。
※取り外し方は、裏面をご参照ください。
● 検査後
再び本製品を装着し、運搬します。
※取り付け方は、裏面をご参照ください。

洗浄

- 3** 必ず本製品を内視鏡から外し、洗浄を行ってください。
洗浄後、高水準消毒または滅菌を行ってください。
※取り外し方は、裏面をご参照ください。

内視鏡洗浄

高水準消毒または滅菌

内視鏡

先端保護チューブ



製品に添付されている取扱説明書を必ずご参照ください。


ご使用上の注意




製品に添付されている取扱説明書を必ずご参照ください。

取り付け／取り外し方法


取り付け

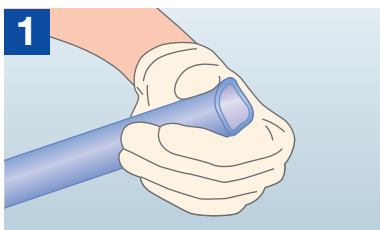

1 ホールド部を十分に開きます。
※内視鏡先端部が唾液等で濡れている場合は、事前にふき取っておきます。

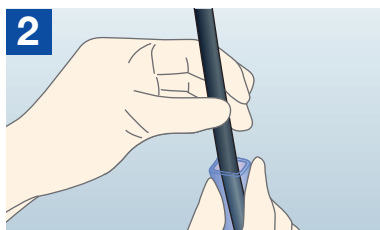


2 ホールド部を開いた状態で、内視鏡先端部になるべく接触しないように内視鏡先端部を本製品に挿入します。

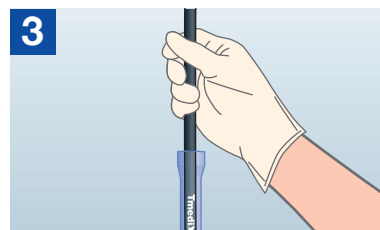


3 内視鏡の先端湾曲部ゴムの上を避けてホールド部を閉じ、内視鏡先端部に固定させます。

取り外し

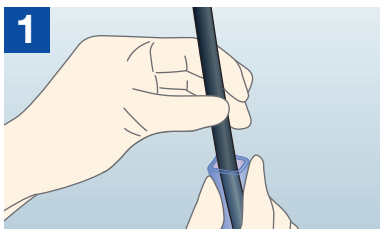

1 内視鏡を押さえ、ホールド部を十分に開きます。

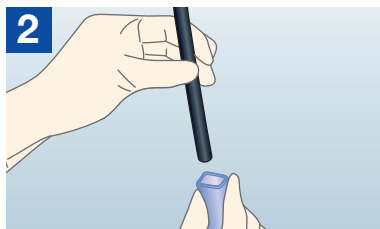

2 ホールド部を開いた状態で、内視鏡先端部になるべく接触しないように内視鏡先端部から本製品を外します。




取り外した本製品は、洗浄および高水準消毒または滅菌してからご使用ください。


洗浄時の注意点

本製品を洗浄する際は、必ず内視鏡から本製品を取り外して行ってください。


洗浄方法

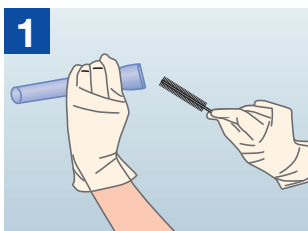


1 スポンジまたは先端が丸いブラシを用意します。

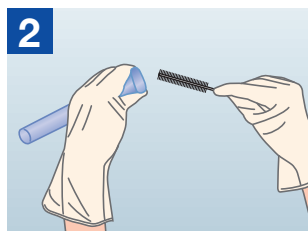

2 ホールド部を十分に開き、洗浄します。

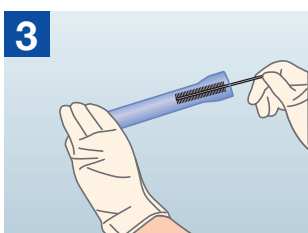


3 ホールド部以外の内側も十分に洗浄します。

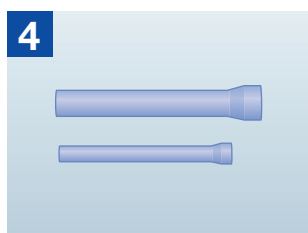

4 全体を洗浄した後、目視で汚れが残っていないか確認します。

内視鏡保管時の注意点

内視鏡を保管する際は、必ず内視鏡から本製品を取り外してください。

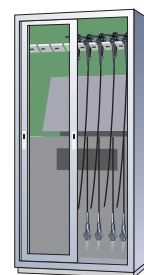

交換時期

以下のような場合になったら交換時期です。

- 製品の透明度が落ちたとき
- 本体の印字が読みにくくなったとき
- ホールド部の圧着力が弱くなったとき

ティーメディクス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス
TEL : 03-3349-8590 FAX : 03-3349-8771
営業部 商品開発担当