

取扱説明書

2021.10

- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書をお読みください。
- 本書では以下の表示を使用しております。

！ 注意

それを守らないと中程度以下の損傷、又は本製品の破損につながる可能性のある事柄を示しています。

- 本製品を使用目的以外には使用しないでください。

1 使用目的

- ・ターゲット台は、鏡視下手術における縫合のトレーニングをするためのものです。
- ・縫合ターゲットは、ターゲット台専用の消耗品です。

2 梱包品の確認

以下の製品が揃っていることをご確認ください。

ターゲット台 S051301-020


1. 本体
2. 縫合ターゲット 5 枚
3. 取扱説明書（本書）

縫合ターゲット S051302-021


1. 縫合ターゲット 10 枚
2. 取扱説明書（本書）

3 各部の名称


ターゲット台

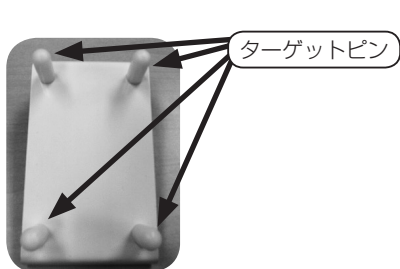

裏面

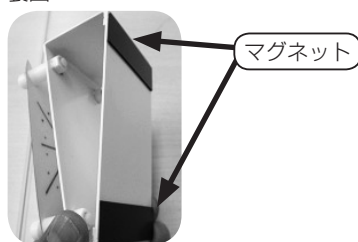

縫合ターゲット

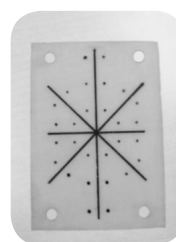

4 使用方法

！ 注意

過度に縫合ターゲットにテンションを掛けしないでください。破損の原因になります。
併用する製品がある場合はその製品の「取扱説明書」を必ず参照してください。


4.1 使用方法

- (1) ターゲット台のターゲットピンに縫合ターゲットの 4 つの孔を合わせるように装着します。
- (2) 市販の鏡視下手術トレーニングの内部に置き、カメラの画像を見ながらターゲット台の位置を調整します。
- (3) 縫合の練習をします。

弊社製品「ラパロトレーナー」でご使用の場合、ターゲット台の裏面のマグネットが適度に固定するため、縫合の練習がしやすくなっています。



装着方法

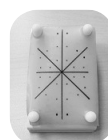

装着時

4.2 縫合ターゲットの交換方法

- (1) 交換する縫合ターゲットを上方へ引っ張り、ターゲット台から外します。
- (2) ターゲット台のターゲットピンに縫合ターゲットの4つの孔を合わせるように装着します。

5 お手入れ

ターゲット台が汚れた場合は、柔らかい布等に中性洗剤を染み込ませて拭き取り、十分に乾かします。

6 保管

常温・常湿で直射日光に当たらない場所に保管してください。

7 製品仕様

ターゲット台

大きさ 縦 121mm × 横 71mm × 高さ 68mm
重量 230g (縫合ターゲット未装着時)
商品コード S051301-020

縫合ターゲット

大きさ 縦 103mm × 横 72mm
素材 天然ゴム
商品コード S051302-021

8 お問い合わせ先

お気づきの点がございましたら、弊社指定販売店または弊社へご連絡ください。

ティームディクス（株） お問い合わせ先

電話番号	03-3349-8590
受付時間	9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(弊社指定休業日、年末年始、土日・祝日を除く)
担 当	商品開発担当